



Checkliste „Anleitung Selbsttests in Schulen“

Grundsätzlich AHA + L + A Regeln einhalten – 3 Meter Abstand zwischen den Testenden Masken sind nur zum Durchführen des Tests abzunehmen!!! Lehrkraft benötigt eine FFP2 Maske!!! Bitte das TESTKONZEPT beachten!!!! https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Konzept_Selbsttests_an_Schulen.pdf	Wer	✓
VORBEREITUNG		
Benötigtes Material: <ul style="list-style-type: none"> • Plastiktüte zur Entsorgung des Testkits • Taschentücher zum Naseschnäuzen, bei Nasenbluten ... • Einwegtücher zum Ablegen des Testkits und evtl. Aufwischen von Lösung • Evtl. Desinfektionsmittel • Evtl. Taschenspiegel zum Einführen des Tupfers in die Nase • Testkits • Uhr zum Stoppen der Zeit • Evtl. Arbeitsstationen zum Einstecken der Teströhrchen, damit sie nicht umkippen, z. B. Duplostein, Wäscheklammer • Evtl. Liste Adressen Schnelltestzentren • Testdokumentation/ Erfassungsbogen für Schulleitung 	Lehrkraft	
Einverständniserklärungen	Lehrkraft	
Tische sollen frei von persönlichen Gegenständen sein!!!	SUS	
DURCHFÜHRUNG		
Zur Einführung der Selbsttests 1. Mal: (möglichst einheitliches Vorgehen in der Schule) <ul style="list-style-type: none"> • Abfragen, wer schon Erfahrungen mit Testungen hatte – positive Erfahrungen aufgreifen, um Ängste reduzieren – negative Erfahrungen versachlichen • Aufklärung, warum die Selbsttests durchgeführt werden: Es ist gut, früh und aufmerksam zu testen, um die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung zu minimieren. Testen ist ein Dienst an der Gemeinschaft. Man übernimmt Verantwortung für andere. Ein positiver PoC Test ist nichts Schlimmes und bedeutet eine Verdachtsdiagnose, die noch mit einem weiteren Test bestätigt werden muss. Viele Menschen durchleben die Erkrankung zudem völlig symptomfrei. Es geht in erster Linie darum, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, um diejenigen zu schützen, die besonders vulnerabel sind. • Erklärung zum Testablauf geben und Regeln festlegen • Hinweis, dass die Tests freiwillig sind und dass es in Ordnung ist, wenn sich SUS nicht testen • Aufklärung, was bei einem positiven Testergebnis passiert (Ein positiver PoC Test bedeutet eine Verdachtsdiagnose, die zunächst nochmals mit einem PoC Test durch geschultes Personal abgeglichen werden muss. Es besteht keine unmittelbare Gefahr für die Lerngruppe. Der SUS muss allerdings die Lerngruppe verlassen und in einen betreuten Warteraum gehen. Der SUS muss abgeholt werden, zumindest sollte sichergestellt werden, dass eine Ansprechperson zu Hause ist. Der SUS muss in einem Schnelltestzentrum oder vom Hausarzt ein zweites Mal mit einem PoC Test getestet werden. 	Lehrkraft	
Bei jeder Testung: <ul style="list-style-type: none"> • Erklärung zum Testablauf / AHA-Regeln und Verhaltensregeln beim Testen einhalten 	Lehrkraft	

<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis, dass Tests freiwillig sind und dass es in Ordnung ist, wenn sich SUS nicht testen • Aufklärung, was bei einem positiven Testergebnis passiert 		
Uhr oder Stoppuhr	Lehrkraft	
Testkits austeilen	Lehrkraft	
Taschentücher und Einwegtücher austeilen	Lehrkraft/ SUS	
Nase schnäuzen je nach Herstellerangaben	Alle	
Hände waschen oder desinfizieren	Alle	
Testkit: Inhalt kontrollieren	Alle	
Arbeitsstation für Röhrchen stellen	LK/SUS	
Röhrchen in eine Arbeitsstation stellen, damit es nicht umkippt	Alle	
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Herstellerhinweise beachten • Das Teststäbchen kann zum Besseren Einführen in die Nase auch weiter oben am Kunststoffstab genommen werden. Lediglich der Tupfer darf nicht berührt werden. • Teststäbchen am Kunststoffende entnehmen. !!! Nicht die Spitze berühren!!! • Die ganze Spitze muss sich im Nasenloch befinden (Beachten Sie die Herstellerangaben!) Der untere Nasenbereich ist ausreichend! • Mindestens 5 Mal den Tupfer an die Innenseiten des Nasenlochs rollen. • Die Nase kann auch von außen gegen das Teststäbchen gedrückt werden, um mehr Nasensekret an das Teststäbchen zu bringen. • Wenn das Teststäbchen im Röhrchen ist, das Röhrchen mehrmals unten zusammendrücken, damit sich das Nasensekret vom Teststäbchen gut löst. • Die Verschlusskappe muss beim Schließen des Röhrchens festsitzen. 	Lehrkraft	
Tests durchführen	Alle	
AUSWERTUNG		
Test auswerten	SUS	
Alle Testkits in verschließbaren Plastikbeutel entsorgen	SUS	
Hände waschen oder desinfizieren	Alle	
Plastikbeutel im Restmüll entsorgen	Lehrkraft/SUS	
Protokoll ausfüllen	Lehrkraft	
POSITIVER PoC TEST		
Beruhigen – Erklärung wiederholen, was ein positiver POC Test bedeutet. Der SUS muss die Lerngruppe verlassen und geht in einen Warteraum. Der SUS muss nach Hause und in einem Schnelltestzentrum oder vom Hausarzt ein 2. Mal getestet werden.	Lehrkraft	